

SERVICSEITE

Gebrauchsanleitung für Strahlenschutzprodukte (MAVIG)

Für Röntgenschutzkleidung und Gonadenabdeckungen gelten folgende Pflegekennzeichnungen:

- Nicht waschen
- Nicht bleichen
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht nass reinigen
- Nicht sterilisierbar

Aufbewahrung und Lagerung

Beachten Sie die Lagerzeit auf der Verpackung. Verwenden Sie MAVIG Spezial-Kleiderbügel oder geeignete MAVIG Aufbewahrungssysteme. Auf keinen Fall sollte Röntgenschutzkleidung gefaltet, über Kanten hängend oder in direkter Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufbewahrungs-, Lager- oder Einsatzort müssen im Rahmen der üblichen Werte von Wohn- und Arbeitsbereichen liegen.

Anwendung Vor dem Gebrauch des Produktes muss dieses auf ersichtliche Schädigungen überprüft werden. Siehe hierzu entsprechende Hinweise unter „Überprüfung“. Ein korrektes Anlegen der Röntgenschutzkleidung ist grundlegend erforderlich. Nur bei Erfüllung dieser Bedingungen ist ein optimaler Strahlenschutz nach den gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt.

Reinigung von ComforTex HPMF

Um die schmutzabweisende Beschichtung des textilen Materials nicht zu verletzen, dürfen zur Reinigung keine aggressiven, schmirgelnden, schneidenden oder kornhaltigen Reinigungsmittel (z.B. Verdüner, Aceton, Scheuermittel) benutzt werden.

Frische Verunreinigungen lassen sich i. d. R. mit einer ca. 20°C warmen Spülmittellauge und einem weichen Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von Natrium-Thiosulfatlösung 10% wässrig. Bei eiweißhaltigen Flüssigkeiten (wie z. B. Blut) kaltes Wasser verwenden.

Reinigung von PVC- bzw. PU-Oberflächen

Leichte Verschmutzungen mit lauwarmer Spülmittellauge und einem weichen Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Fleckenstellen mit einem alkoholgetränkten Leinenlappen abwischen, mit klarem Wasser abspülen.

!!! Unterscheidung zwischen Produkten mit textilem und PVC - bzw. PU-beschichtetem Bezugsmaterial bei Reinigung und Desinfektion !!!

Frische Verunreinigungen lassen sich i. d. R. mit einer ca. 20°C warmen Spülmittellauge und einem weichen Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von Natrium-Thiosulfatlösung 10% wässrig. Bei eiweißhaltigen Flüssigkeiten (wie z. B. Blut) kaltes Wasser verwenden. **Überprüfung**

Gemäß DIN 6857-2 ist die regelmäßige Kontrolle von Strahlenschutzkleidung ab sofort verpflichtend, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz von körperlicher Gesundheit und Umwelt nach § 21 RöV zu gewährleisten. Bitte kontaktieren Sie unser geschultes Fachpersonal der BAROWI-Med GmbH unter 089-32197720 für nähere Informationen.

Desinfektion von ComforTex HPMF

Zur Erhaltung der Eigenschaften unserer Röntgenschutz-Produkte empfehlen wir den Einsatz von Desinfektionsmitteln auf Guanidinbasis. Die Wischdesinfektion ist mit geringem mechanischen Druck durchzuführen. Der Desinfektion sollte immer eine, wie auf Seite 5 beschriebene, Reinigung vorausgehen.

Nicht verwendet werden dürfen Desinfektionsmittel auf Wirkstoffbasis Alkohole, keine Alkohole (z.B. Ethanol, Isopropanol) und oxidierend wirkende, sowie salzhaltige und chlospaltende Desinfektionsmittel, welche die Oberfläche der Bezugsmaterialien stärker als Desinfektionsmittel auf anderer chemischer Basis angreifen.

Desinfektion von PVC- bzw. PU-Oberflächen

Zur Desinfektion können die im medizinischen Bereich handelsüblichen und für PVC bzw. PU geeigneten Desinfektionsmittel verwendet werden. Bitte mit klarem Wasser nachspülen.

Die Wischdesinfektion ist mit geringem mechanischen Druck durchzuführen. Der Desinfektion sollte immer eine, wie vorher beschriebene, Reinigung vorausgehen.

!!! Unterscheidung zwischen Produkten mit textilem und PVC - bzw. PU beschichtetem Bezugsmaterial bei Reinigung und Desinfektion !!!

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt entsprechend lokaler Bestimmungen und gesetzlicher Regelungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der BAROWI-Med GmbH.